

Los tratamientos en aerosol y su gato

La aerocámara felina (Feline Aerosol Chamber, FAC) **AeroKat*** fue desarrollada para ser usada con un inhalador a fin de suministrarle medicamento en aerosol a su gato.



Los medicamentos en aerosol suministrados por Inhaladores de Dosis Medida (Metered Dose Inhalers, MDI) o simplemente inhaladores han sido usados para tratar afecciones respiratorias en humanos desde la década de 1960. Dado que las enfermedades respiratorias felinas son similares a las afecciones humanas, pueden recibir un tratamiento similar.² Sin embargo, teniendo en cuenta que los inhaladores típicos administran una dosis a más de 60 millas por hora³, suministrar el medicamento a los gatos sin una aerocámara sería muy difícil.


Cuando la FAC **AeroKat*** se conecta al inhalador, su gato puede respirar normalmente e inhalar el medicamento en aerosol de manera que penetre profundamente en los pulmones, justo donde es necesario. Sin la FAC **AeroKat***, su gato no recibiría los beneficios del medicamento, ya que la mayor parte quedaría atrapada en la boca o en la garganta.

Para obtener más información sobre la ciencia del aerosol, visite nuestro sitio web en:


www.aerokat.com

Instrucciones fáciles:


Para conocer las instrucciones completas, consulte el prospecto del envase.

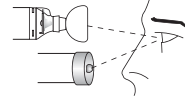


Controle que no haya objetos extraños y asegúrese de que todos los componentes estén intactos.

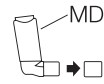


Retire la tapa del Inhalador de Dosis Medida (inhalador).

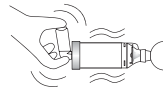

Introduzca el inhalador en la parte posterior de la FAC **AeroKat*** y agite.

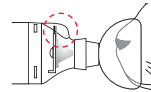

Coloque la máscara con cuidado en la cara de su gato. A medida que el gato inhale, el indicador **Flow-Vu*** se abrirá o se desplazará hacia el gato. El indicador **Flow-Vu*** regresará a la posición vertical cuando su gato deje de inhalar o exhale.

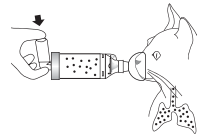

A medida que el gato inhale, presione el inhalador y sostenga la máscara en su lugar mientras el gato respira entre 5 y 6 veces. Mantenga la máscara bien sellada y use el indicador **Flow-Vu*** como ayuda para contar las respiraciones.



Siga las instrucciones proporcionadas con el inhalador con respecto a la cantidad de tiempo que debe esperar para repetir las instrucciones 3 a 5 según lo indicado.



Distribuido por:

AeroKat*
Aerocámara felina



Fabricado por:

Trudell Medical International¹

725 Third Street, London, Ontario, Canada, N5V 5G4
Teléfono: +1-519-455-7060 Fax: +1-519-455-7858
Línea gratuita en América del Norte: 1-800-465-3296
Correo electrónico: aerokat@trudellmed.com

MD-7678-0408. * marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Trudell Medical International. fab es una marca comercial de Feline Advisory Bureau. Copyright © Trudell Medical International 2001, 2002, 2005, 2007, 2009. Todos los derechos reservados. Cubierto por las patentes de los EE. UU. Nros. 5,848,588; 6,345,617; 6,435,177 y patentes pendientes.

¹ Padrid, Philip. "Feline Asthma: Diagnosis and Treatment" in Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice Vol. 30 No. 6. November 2000 pág. 1284

² idem., *ibid.*, pág. 1285

³ Newman S. "Deposition and Effects of Inhalation Aerosols". Lund, Sweden; AB Draco; 1983, 13-22

SISTEMA DE SUMINISTRO DE FÁRMACO EN AEROSOL
para
ASMA FELINA



AeroKat*
Aerocámara felina

www.aerokat.com

¿Su gato sufre de síntomas relacionados con el asma?

Si su gato tiene alguno de los siguientes síntomas, es posible que esté sufriendo de asma felina:

- sibilancia frecuente
- tos persistente
- boca abierta o dificultad para respirar



Aproximadamente uno en cien gatos tiene asma, y quizás más, ya que los síntomas suelen confundirse con las bolas de pelo. El asma por lo general afecta a los gatos de entre 2 y 8 años, y se produce con más frecuencia en los gatos de raza siamés e himalayó.



El indicador **Flow-Vu*** en la FAC **AeroKat***

El indicador **Flow-Vu*** de la FAC **AeroKat*** le ayudará a contar la cantidad de veces que su gato respira a través de la cámara y garantiza que esté bien sellada. Esto ayuda a asegurar que el medicamento en aerosol penetre profundamente en los pulmones de su gato.

Cuando el indicador **Flow-Vu*** se abre o se desplaza hacia su gato, significa que el gato está inhalando; ese es el momento en que debe presionar el inhalador. Cuando el gato deja de inhalar, el indicador **Flow-Vu*** regresa a la posición vertical. Este mayor control le ayudará a manejar mejor el asma de su gato.



- Fácil de usar y de limpiar
- Reduce el riesgo de efectos secundarios asociados con píldoras, inyecciones o jarabe
- La cámara de polímero inastillable y antiestática de diseño exclusivo asegura que el medicamento del inhalador penetre profundamente en los pulmones de su gato
- Dos tamaños de máscara que se adaptan a todas las razas y tamaños de gatos
- La válvula de exhalación dirige el flujo en dirección contraria a su gato para evitar la irritación

AeroKat*
Aerocámara felina



¿Cómo puedo comprar la FAC **AeroKat***?

Muchos veterinarios ofrecen la FAC **AeroKat*** en su clínica, pero también puede comprarla a través de nuestro sitio web (www.aerokat.com). Consulte con el veterinario de su gato antes de comprar el dispositivo para asegurarse de que la FAC **AeroKat*** sea adecuada para la afección de su gato.



¿Cómo funciona la FAC **AeroKat***?

La FAC **AeroKat*** conserva el medicamento del inhalador (corticoesteroide o broncodilatador) en la cámara, lo que le permite a su gato inhalarlo respirando varias veces. Además, la cámara separa las partículas de aerosol más gruesas (que tienden a depositarse en la boca y la nariz) para que las partículas más finas y beneficiosas penetren profundamente en los pulmones, justo donde son necesarias.



¿Qué medicamentos puedo usar con la FAC **AeroKat***?

La FAC **AeroKat*** está diseñada para ser usada con todos los Inhaladores de Dosis Medida (MDI), o simplemente inhaladores, que se recetan con mayor frecuencia, según las indicaciones de su veterinario.



¿Por qué tendría que usar esto en lugar de los corticoesteroides orales tradicionales?

Los corticoesteroides orales tradicionales (píldoras, inyecciones o jarabe) tienen muchos posibles efectos secundarios serios para su gato, como pancreatitis, resistencia a la insulina (diabetes), poliuria, cistitis, micción inadecuada y cambios de comportamiento.¹



¿Hay algún motivo por el cual mi gato no podría usar la FAC **AeroKat***?

No hay ninguna contraindicación específica para la FAC **AeroKat*** en los gatos. El principio de la FAC **AeroKat*** se basa en el suministro de un fármaco en aerosol (inhalador), sistema que actualmente se usa en humanos, caballos y perros. El producto solo debe usarse con recomendación de un veterinario.

