



Trudell Medical International[®]
 725 Third Street, London, Ontario,
 Canada N5V 5G4
 customerservice@trudellmed.com
 +1-519-455-7000
 +1-519-455-6479
 www.trudellmed.com



Trudell Medical International Europe Limited
 BioCity Nottingham, Pennyfoot Street,
 Nottingham, United Kingdom NG1 1GF

ESPAÑOL

La cámara **AC[®] Girlz[®]** o **AC[®] Boyz[®]** se utiliza con un inhalador para facilitar la respiración y así estar preparado para hacer todo lo que desea, ya sea practicar deportes o salir con amigos.

Sabía usted...

- Los **atletas olímpicos** también sufren de asma
- No está solo** 9 de 10 personas piensan que el uso de inhalador¹ es difícil
- La **cámara** mantiene la medicación del inhalador hasta que la inhala

Para obtener más información sobre su cámara nueva, visite www.aerochamber.com

¿Cómo utilizo mi cámara?

- Revise la cámara para asegurarse de que no esté dañada. Si está dañada, reemplácela de inmediato.
- Retire la tapa del inhalador y de la cámara.
- Sacuda el inhalador durante 5 segundos, luego insértelo en la parte trasera de la cámara.

Esta cámara se puede usar directamente sin el paquete. Antes de utilizarla, asegúrese de haber leído estas instrucciones y las instrucciones del inhalador.

- El indicador **Flow-Vu[®]** proporciona la garantía del uso correcto de la cámara. Es útil en especial si una persona lo está ayudando a tomar su medicina. El indicador **Flow-Vu[®]** se mueve hacia usted a medida que inhala y se aleja mientras exhala. El indicador **Flow-Vu[®]** sólo se mueve si la boquilla está bien sellada.
- Cuando esté listo, exhale suavemente. Comience a inhalar y presione el inhalador para que su medicina se rocíe en la cámara. Presione sólo una bocanada a la vez. Si oye el sonido del pitido significa que está inhalando demasiado rápido. ¡INHALE MÁS DESPACIO!
- Deberá esperar antes de tomar otra bocanada de medicina. Verifique las instrucciones del inhalador para saber cuántas bocanadas su médico desea que tome y cuánto debe esperar entre las bocanadas.

Consejos

La mejor forma de inhalar la medicina es realizar una inhalación lenta y profunda luego de 5 a 10 segundos cuando mantiene la inhalación. Si todavía no puede hacer eso, solo tome 2 ó 3 inhalaciones lentas y asegúrese de mantener los labios firmemente sellados alrededor de la boquilla.

¿Cómo limpio mi cámara? Limpíela semanalmente siguiendo las instrucciones a continuación.

- Quite la parte trasera. Gire la cámara como se muestra para separar la parte delantera. Retire la tapa de la boquilla.
- Ponga las partes en agua tibia y jabón detergente durante 15 minutos. Enjuague las piezas con agua limpia.
- Coloque las partes en la rejilla superior del lavavajillas. Asegúrese de que el producto esté firmemente colocado hacia arriba como se muestra en la imagen. Retire del lavavajillas.

- Deje que se seque completamente.
- Para armarlo nuevamente, coloque la parte delantera sobre la cámara y gire firmemente hasta que se bloquee en posición. Coloque la tapa en la boquilla.
- Centre la característica de alineación en la parte trasera con el indicador **Flow-Vu[®]**. Presione firmemente para sujetar la parte trasera.

Notas

- El producto debe reemplazarse después de 12 meses de uso.
 - Este producto no contiene látex.
 - No comparta este dispositivo médico.
 - Si observa la acumulación de medicamento en la cámara, limpie la parte interior de la cámara suavemente con un paño.
 - No se recomienda lavarlo con platos demasiado sucios.
 - Si lo limpia en un lavavajillas, enjuáguelo.
 - Lavavajillas validado hasta 70°C.
- ⚠ Esto no es un juguete.