



AeroChamber Plus Flow-Vu

Anti-Static Valved Holding Chamber
MOUTHPIECE / LARGE MASK



Trudell Medical International
725 Third Street, London, Ontario,
Canada N6V 5G4
customer.service@trudellmed.com
+1-519-455-7000
+1-519-455-6478
www.trudellmed.com



Trudell Medical International Europe Limited
BioCity Nottingham, Pennyfoot Street,
Nottingham, United Kingdom NG1 1GF

中文

擬定用途

該吸藥輔助器旨在與定量噴霧吸入器 (metered dose inhaler, 又稱「吸入器」) 一同使用, 向您的肺部注入醫療護理提供者開立的噴霧藥物。

請造訪
www.aerochamber.com,
瀏覽「患者易用影片」

如何使用新型吸藥輔助器

該吸藥輔助器打開包裝即可直接使用。使用前請確保閱讀此類說明與吸入器隨附之說明。

- 1** 使用之前, 請仔細檢查該吸藥輔助器。若發現任何缺陷, 請立即更換。
- 2** 拆除吸入器和吸藥輔助器的封蓋。
- 3** 使用前請依吸入器隨附之說明搖動吸入器。
- 4** 將吸入器插入吸藥輔助器的背板。
- 5** 管口
將吸藥輔助器管口放入口中, 然后用嘴唇將其有效密封。僅當您用嘴唇將管口有效密封時, **Flow-Vu** 指示器才會移動。
- 6** 管口
將面罩放到大面罩上, 確保面罩有效密封。僅當面罩有效密封時, **Flow-Vu** 指示器才會移動。
- 7** 照吸入器隨附之說明等待一段時間後再重複第 3-6 步驟。

平緩呼吸, 在開始緩慢吸入時按壓吸入器。使用 **Flow-Vu** 指示器, 協助調整該步驟。透過口部緩慢進行深呼吸, 直至吸滿一口氣為止。如有可能, 保持呼吸 5-10 秒。否則, 在按壓吸入器後, 用嘴唇咬緊管口, 透過吸藥輔助器正常呼吸 2-3 次。如果您聽到 **FlowSignal** 鳴笛聲, 放緩速度。這表示您吸入過快。每次僅吹氣一 (1) 次。

平緩呼吸, 在開始緩慢吸入時按壓吸入器。使用 **Flow-Vu** 指示器, 協助調整該步驟。按壓吸入器後, 保持密封狀態, 呼吸 5-6 次。如果您聽到 **FlowSignal** 鳴笛聲, 放緩速度。這表示您吸入過快。每次僅吹氣一 (1) 次。

清潔說明

該吸藥輔助器可直接打開包裝使用, 應每週清洗一次。

- 1** 卸下背板。若要拆下前板, 請按如上所示轉動吸藥輔助器。取下管嘴護蓋。
- 2** 將這些部件浸入溫和的餐具洗滌劑與溫水配製而成的溶液中, 持續浸泡 15 分鐘。輕輕攪動。然後在清水中漂洗各部件。
- 3** 將這些部件放在洗碗機頂架上。確保該產品牢固放置且如圖所示正面朝上。完成後將其從洗碗機中取出。
- 4** 若重新裝配該產品, 則將前板固定到吸藥輔助器的末端, 然後用力轉動, 直至其固定到位。對於帶管嘴的型號而言, 當不使用該吸藥輔助器時, 應切記將護蓋蓋到管嘴上。
- 5** 將背板上的對齊標記居中对準 **Flow-Vu** 指示器, 如圖所示。按下背板, 使其牢固連接。

附註:

- 請於使用 12 個月後更換產品。
- 本產品不含乳膠。
- 切勿與他人共用此醫療器材。
- 如果您發現吸藥輔助器殘留有藥物, 請用軟布輕輕擦拭吸藥輔助器內部。
- 建議不要跟過熱的餐具一同清洗。
- 如果使用洗碗機清洗該產品, 則應使用洗碗機專用光潔劑。
- 洗碗機最高溫度不能超過 70°C。

小心:

- 請勿讓兒童單獨使用吸藥輔助器。本品並非玩具。