



# AeroChamber Plus Flow-Vu

Anti-Static Valved Holding Chamber  
MOUTHPIECE / LARGE MASK



Trudell Medical International  
725 Third Street, London, Ontario,  
Canada N6V 5G4  
customer.service@trudellmed.com  
+1-519-455-7000  
+1-519-455-6478  
www.trudellmed.com



Trudell Medical International Europe Limited  
BioCity Nottingham, Pennyfoot Street,  
Nottingham, United Kingdom NG1 1GF

## ČEŠTINA

### ZAMÝŠLENÝ ÚČEL

Tato komora je určena k použití spolu s odměřeným inhalátorem pro přivádění aerosolových léků do plic, jak je předepsáno vašim poskytovatelem zdravotní péče.

Video pro snadné použití je k dispozici na adrese [www.aerochamber.com](http://www.aerochamber.com)

### JAK POUŽÍVAT NOVOU KOMORU

Tuto komoru lze použít přímo po vybalení. Před použitím si přečtěte tyto pokyny dodané s inhalátorem.

- 1** Před použitím pečlivě zkontrolujte komůrku. Pokud si všimnete nějaké závady, okamžitě ji vyměňte.
- 2** Odstraňte uzávěry z inhalátoru a komory.
- 3** Inhalátor bezprostředně před použitím protřepejte podle návodu k obsluze dodávaným společně s ním.
- 4** Nasadte inhalátor do zadního dílu komory.
- 5 NÁUSTEK** Vložte náustek do úst a sevřete k lem něj rty k zajištění účinného těsnění. Indikátor **Flow-Vu**<sup>®</sup> se pohne pouze, když je zajištěno dobré utěsnění.  
**VELKÁ MASKA** Pro zajištění účinného těsnění nasadte na obličej masku. Indikátor **Flow-Vu**<sup>®</sup> se pohne pouze, když je zajištěno dobré utěsnění.
- 6 NÁUSTEK** Jemně vydechněte a stiskněte inhalátor na začátku pomalého nadechování. Použijte indikátor **Flow-Vu**<sup>®</sup> jako pomůcku při koordinaci tohoto kroku. Dýchejte pomalu a zhluboka ústy až do plného nádechu. Zadržte na 5 – 10 sekund, pokud je to možné. V opačném případě pevně sevřete rty na náustku a 2 – 3krát se nadychněte z komory po stisknutí inhalátoru. ZPOMALTE, pokud uslyšíte píšťaví zvuk **FlowSignal**<sup>®</sup>. Znamená to, že inhalujete příliš rychle. Aplikujte jedno (1) stlačení v jednom okamžiku.
- 7 VELKÁ MASKA** Jemně vydechněte a stiskněte inhalátor na začátku pomalého nadechování. Použijte indikátor **Flow-Vu**<sup>®</sup> na pomoc při koordinaci tohoto kroku. Udržujte utěsnění na 5 – 6 dechů po stisknutí inhalátoru. ZPOMALTE, pokud uslyšíte píšťaví zvuk **FlowSignal**<sup>®</sup>. Znamená to, že dýcháte příliš rychle. Aplikujte jedno (1) stlačení v jednom okamžiku.

Postupujte podle pokynů dodaných s inhalátorem pro dobu čekání mezi opakováním kroků 3 – 6.

### POKYNY K ČIŠTĚNÍ

Tuto komoru je možné použít ihned po vybalení a je třeba ji čistit jednou týdně.

- 1** Odstraňte zadní díl. Chcete-li odpojit přední díl, otočte komůrkou, jak je znázorněno výše. Sejměte kryt náustku.
- 2** Namočte díly na 15 minut do slabého roztoku přípravku na mytí nádobí a vlažné čisté vody. Šetrně omyjte. Opláchněte jednotlivé součásti čistou vodou.
- 3** Dejte jednotlivé součásti do horního stojanu myčky nádobí. Ujistěte se, že je výrobek bezpečně uložen lícem nahoru, jak je znázorněno na obrázku. Po dokončení vyjměte z myčky nádobí.
- 4** Očistěte přebytečnou vodu a nechte uschnout na vzduchu ve svislé poloze. Než zařízení opět složíte, přesvědčte se, že jsou jeho součásti suché.
- 5** Znovu sestavte, nasadte přední díl na konec komůrky a pevně otočte, dokud není bezpečně zajištěn. V případě modelů s náustkem je třeba vždy po použití vrátit na náustek kryt, když se komůrka nepoužívá.

**Vyrovnávací prvek**  
Vycentrujte vyrovnávací značku na zadním dílu s indikátorem **Flow-Vu**<sup>®</sup>, jako je znázorněno na obrázku. Pevným stisknutím připojte zadní díl.

#### Poznámky:

- Výrobek je třeba vyměnit po 12 měsících používání.
- Tento výrobek neobsahuje latex.
- Toto zdravotnické zařízení nikomu nepůjčujte.
- Pokud dojde k nahromadění léku uvnitř komory, lehce vnitřek vytřete měkkým hadříkem.
- Mytí v myčce s příliš špinavým nádobím se nedoporučuje.
- Při čištění v myčce použijte leštidlo.
- Myčka nádobí je ověřena až do 70°C.

#### ⚠ Upozornění:

- **Nenechávejte komoru bez dozoru v ruce dětí. Není to hračka.**