



AeroChamber Plus Flow-Vu

Anti-Static Valved Holding Chamber
MOUTHPIECE / LARGE MASK



Trudell Medical International*
725 Third Street, London, Ontario,
Canada N6V 5G4
customer.service@trudellmed.com
+1-519-455-7000
+1-519-455-6478
www.trudellmed.com



Trudell Medical International Europe Limited
BioCity Nottingham, Pennyford Street,
Nottingham, United Kingdom NG1 1GF

Ελληνικά

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό ο θάλαμος προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με μια δοσιμετρική συσκευή εισπνοών για τη χορήγηση φαρμάκου σε μορφή αερολύματος (aerosol) στους πνευμόνες σας, όπως έχει συνταγογραφηθεί από το γιατρό σας.

Εύκολα στη χρήση βίντεο για τους ασθενείς διατίθενται στη διεύθυνση www.aerochamber.com

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΑΛΑΜΟ

Αυτός ο θάλαμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτές τις οδηγίες και τις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή εισπνοών.

- 1** Πριν τη χρήση, εξετάστε προσεκτικά τη φιάλη. Αντικαταστήστε αμέσως εάν παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα.
- 2** Αφαιρέστε τα πώματα από τη συσκευή εισπνοών και το θάλαμο.
- 3** Ανακινήστε τη συσκευή εισπνοών αμέσως πριν τη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή εισπνοών.
- 4** Εισαγάγετε τη συσκευή εισπνοών στο οπίσθιο τμήμα του θαλάμου.
- 5** **ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ**
Τοποθετήστε το επιστόμιο στο στόμα σας και κλείστε τα χείλη σας γύρω από το επιστόμιο για να εξασφαλίσετε αποτελεσματική στεγάνωση. Ο δείκτης **Flow-Vu** κινείται μόνο εάν έχετε εξασφαλίσει καλή στεγάνωση.
- 6** **ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ**
Αναπνεύστε ομαλά και πιέστε τη συσκευή εισπνοών στην αρχή μιας αργής εισπνοής. Χρησιμοποιήστε το δείκτη **Flow-Vu** ως βοήθημα για το συντονισμό αυτού του βήματος. Αναπνεύστε αργά και βαθιά από το στόμα έως ότου ολοκληρώσετε μια πλήρη αναπνοή. Κρατήστε την αναπνοή σας για 5 – 10 δευτερόλεπτα, εάν είναι δυνατόν. Διαφορετικά, κρατήστε τα χείλη σας κλειστά γύρω από το επιστόμιο και αναπνεύστε κανονικά 2 – 3 φορές μέσω του θαλάμου αφού πιέσετε τη συσκευή εισπνοών. **ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΤΕ** την αναπνοή εάν ακούσετε τον ήχο συρμού του **FlowSignal**®. Αυτό σημαίνει ότι αναπνεύετε πολύ γρήγορα. Χορηγήστε έναν (1) ψεκασμό κάθε φορά.
- 7** **ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣΚΑ**
Αναπνεύστε ομαλά και πιέστε τη συσκευή εισπνοών στην αρχή μιας αργής εισπνοής. Χρησιμοποιήστε το δείκτη **Flow-Vu** ως βοήθημα για το συντονισμό αυτού του βήματος. Διατηρήστε τη σφράγιση για 5 – 6 αναπνοές μετά την πίεση του κουμπιού της συσκευής εισπνοών. **ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΤΕ** την αναπνοή εάν ακούσετε τον ήχο συρμού του **FlowSignal**®. Αυτό σημαίνει ότι αναπνεύετε πολύ γρήγορα. Χορηγήστε έναν (1) ψεκασμό κάθε φορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Αυτό ο θάλαμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία και πρέπει να καθαρίζεται κάθε βδομάδα.

- 1** Αφαιρέστε το οπίσθιο εξάρτημα. Για απόσπαση του πρόσθιου εξαρτήματος, περιστρέψτε τη φιάλη όπως φαίνεται παραπάνω. Αφαιρέστε το πώμα του επιστομίου.
- 2** Εμβυθίστε και τα δύο εξαρτήματα για 15 λεπτά σε ήπιο διάλυμα υγρού απορρυπαντικού πιάτων και χλιαρού καθαρού νερού. Ανακινήστε ελαφρά. Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με καθαρό νερό.
- 3** Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στο πάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ασφαλώς τοποθετημένο με την πρόσοψη προς τα πάνω όπως φαίνεται στην εικόνα. Αφαιρέστε το από το πλυντήριο πιάτων όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος πλυσίματος.
- 4** Ανακινήστε για να αφαιρέσετε την υπερβόλυσια ποσότητα νερού και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει σε κάθετη θέση. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν την επανασυναρμολόγησή τους.
- 5** Για επανασυναρμολόγηση, προσαρτήστε το πρόσθιο εξάρτημα στο άκρο της φιάλης και περιστρέψτε σταθερά έως ότου ασφαλίσει στην κλειδωμένη του θέση. Για μοντέλα με επιστόμιο, το προστατευτικό πώμα πρέπει να βρίσκεται πάντα στο επιστόμιο όταν δεν χρησιμοποιείται η φιάλη.

Σημειώσεις:

- Πρέπει να αντικαθιστάτε το προϊόν μετά από χρήση 12 μηνών.
- Αυτό το προϊόν δεν περιέχει λατέξ.
- Μην μοιράζετε αυτήν την ιατρική συσκευή με άλλους.
- Εάν παρατηρήσετε συσσώρευση φαρμάκου στο θάλαμο, ξεπλύνετε το εσωτερικό του θαλάμου απαλά με ένα μαλακό πανάκι.
- Δεν συνιστάται το πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων με πολύ λερωμένα πιάτα.
- Εάν χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων, χρησιμοποιήστε ένα βοηθητικό προϊόν για το ξέπλυμα.
- Το πλυντήριο πιάτων πιστοποιείται έως 70°C.

⚠️ Θέματα προσοχής:
• Μην αφήνετε το θάλαμο κοντά σε παιδιά χωρίς επίτηρηση. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.