



AeroChamber Plus Flow-Vu

Anti-Static Valved Holding Chamber
MOUTHPIECE / LARGE MASK



Trudell Medical International[®]
725 Third Street, London, Ontario,
Canada N6V 5G4
customer.service@trudellmed.com
+1-519-455-7000
+1-519-455-6478
www.trudellmed.com



Trudell Medical International Europe Limited
BioCity Nottingham, Pennyfoot Street,
Nottingham, United Kingdom NG1 1GF

TÜRKÇE

KULLANIM AMACI

Bu bölmenin, sağlık uzmanınız tarafından belirtilen şekilde akciğere aerosol ilaç aktarmak üzere ölçümlü doz inhaleri ile birlikte kullanılması amaçlanır.

Pratik Hasta Videolarına şu adresten ulaşabilirsiniz:
www.aerochamber.com

YENİ BÖLMENİZİN KULLANIMI

Bu bölme, ambalajından çıktığı şekliyle kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce, inhaler ile birlikte gelen bu talimatları mutlaka okuyun.

- 1** Kullanımdan önce hücreyi dikkatle inceleyin. Herhangi bir kusur tespit ederseniz derhal değiştirin.
- 2** Inhalerin ve bölmenin kapaklarını çıkarın.
- 3** Ürünle gelen talimatlar doğrultusunda, inhaleri kullanmadan hemen önce çalkalayın.
- 4** Inhaleri bölmenin Arka Bölümüne takın.
- 5 AĞIZLIK BÜYÜK MASKE**
Ağız ünitesini ağızınıza yerleştirip, etkin bir izolasyon sağlamak için, dudaklarınızı, çevresinde kapatın. **Flow-Vu®** Göstergesi sadece, izolasyon sağlam ise hareket eder.
Maskeyi yüzünüze takın ve etkin bir şekilde izolasyon oluşmasını temin edin. **Flow-Vu®** Göstergesi sadece, izolasyon sağlam ise hareket eder.
- 6 AĞIZLIK BÜYÜK MASKE**
Hafifçe nefes verin ve yavaşça içine çekmeye başladığınızda inhalere bastırın. Bu adımın koordinasyonunda size yardımcı olması için **Flow-Vu®** Göstergesini kullanın. Tam bir nefes alana kadar, ağızdan yavaş ve derin nefesler alın. Mümkünse nefesinizi 5-10 saniye tutun. Aksi halde, ağızlığı dudaklarınızla sıkıca kavramaya devam ederek, inhalere bastırdıktan sonra bölmeden 2-3 kez normal nefes alın. **FlowSignal®** Isık sesini duyarsanız YAVAŞLAYIN. Bu durumda çok hızlı nefes çekiyorsunuz demektir. Her seferinde bir (1) kez üfleyin.
- 7 BÜYÜK MASKE**
Hafifçe nefes verin ve yavaşça içine çekmeye başladığınızda inhalere bastırın. Bu adımın koordinasyonunda size yardımcı olması için **Flow-Vu®** Göstergesini kullanın. Inhalere bastırdıktan sonra 5-6 nefes boyunca kapanma halini koruyun. **FlowSignal®** Isık sesini duyarsanız YAVAŞLAYIN. Bu durumda çok hızlı nefes çekiyorsunuz demektir. Her seferinde bir (1) kez üfleyin.

3-6. adımları tekrarlamadan önce beklemeniz gereken süreyi öğrenmek için inhaler ile birlikte gelen talimatlara bakın.

TEMİZLİK TALİMATLARI

Bu bölme, ambalajından çıktığı şekliyle kullanıma hazırdır ve daha sonra haftada bir temizlenir.

- 1** Arka üniteyi çıkarın. Ön üniteyi çıkarmak için, hücreyi, yukarıda gösterildiği şekilde bükün. Ağız ünitesi kapağını çıkarın.
- 2** Parçaları 15 dakika süre ile ılık temiz su ve yumuşak bir bulaşık deterjanı solüsyonunda bekletin. Hafifçe karıştırın. Parçaları temiz suda durulayın.
- 3** Parçaları bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirin. Ürünlerin, resimde gösterildiği üzere sağlam bir şekilde yerleştirilmiş olmasını temin edin. Tamamlandığı zaman bulaşık makinesinden çıkarın.
- 4** Sallayarak fazla suyu alın ve dikey konumda kurumaya bırakın. Yeniden monte etmeden önce parçaların kuru olduğundan emin olun.
- 5** Tekrar monte etmek için, Ön üniteyi hücrenin ucuna yerleştirip yerine emniyetli bir şekilde kilitlene kadar sıkıca çevirin. Ağız ünitesi modellerde, hücre kullanılmadığı zaman koruyucu kapak, daima ağız ünitesinin üzerine yerleştirilmelidir.

Hizalama Çizgisi

Arka ünite üzerinde Hizalama Kısmını, gösterildiği şekilde **Flow-Vu®** Göstergesinin ortasına getirin. Arka üniteyi yerleştirmek üzere sıkıca bastırın.

Notlar:

- Ürün 12 aylık kullanım sonunda değiştirilmelidir.
- Bu ürün lateks içermez.
- Bu tıbbi cihazı başkalarıyla ortak kullanmayın.
- Bölmede ilaç birikimi olduğunu fark ederseniz, bölmenin içini yumuşak bir bez yardımıyla yavaşça yıkayın.
- Bulaşık makinesinde aşırı kirliliği bulaşıkla beraber yıkanması tavsiye edilmez.
- Bir bulaşık makinesinde yıkıyorsanız, bir durulama destek malzemesi kullanın.
- Bulaşık makinesinde 70°C'ye kadar kullanım uygundur.

⚠️ Önlemler:

- **Bölmeyi çocukların yanında gözetimsiz bırakmayın. Bu cihaz oyuncak değildir.**