



AeroChamber
Plus **Flow-Vu**
Anti-Static Valved Holding Chamber
SMALL MASK / MEDIUM MASK



Trudell Medical International¹
725 Third Street, London, Ontario,
Canada N6Y 5G4
☎ customer.service@trudellmed.com
☎ +1-519-405-7069
☎ +1-519-405-6478
www.trudellmed.com



Trudell Medical International Europe Limited
BioCity Nottingham, Pennyfoot Street,
Nottingham, United Kingdom NG1 1GF

ČEŠTINA

ZAMÝŠLENÝ ÚČEL

Tato komora je určena k použití spolu s odměřeným inhalátorem pro přivádění aerosolových léků do plic, jak je předepsáno vašim poskytovatelem zdravotní péče.

TIPY

- 1 Chvalte a odměňujte.
- 2 Použijte plyšové medvídky nebo panenky a hrajte si, že používají komoru, aby to vypadalo jako hra.
- 3 Pokud je to možné, aplikujte léčbu, když je dítě šťastné a nepláče.

Video pro snadné použití je k dispozici na adrese www.aerochamber.com

JAK POUŽÍVAT NOVOU KOMORU

Tuto komoru lze použít přímo po vybalení. Před použitím si přečtěte tyto pokyny dodané s inhalátorem.

- 1 Před použitím pečlivě zkontrolujte komůrku. Okamžitě vyměňte, pokud si všimnete nějaké závady.
- 2 Odstraňte kryt inhalátoru.
- 3 Inhalátor bezprostředně před použitím protřepte podle návodu k obsluze dodávaným společně s ním.
- 4 Nasadte inhalátor do zadního dílu komory.
- 5 Indikátor **Flow-Vu**
Nasadte si masku na obličej a zajistěte účinné těsnění. Indikátor **Flow-Vu** se pohne pouze, pokud má dítě zajištěné dobré těsnění.
- 6 Stiskněte inhalátor na začátku pomalého nadechování, když se indikátor **Flow-Vu** začne pohybovat směrem k dítěti. Indikátor **Flow-Vu** použijte k počítání dechů. Po stisknutí inhalátoru udržujte utěsnění po dobu 5 – 6 dechů. Aplikujte vždy jen jedno (1) stlačení.
- 7 Postupujte podle pokynů dodaných s inhalátorem pro dobu čekání mezi opakovanými kroky

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

Tuto komoru je možné použít ihned po vybalení a je třeba ji čistit jednou týdně.

- 1 **Zadní díl** / **Přední díl**
Odstraňte zadní díl. Chcete-li odpojit přední díl, otočte komůrkou, jak je znázorněno výše.
- 2 Namočte díly na 15 minut do slabého roztoku přípravku na mytí nádobí a vlažné čisté vody. Šetrně omyjte. **NEBO** Opláchněte jednotlivé součásti čistou vodou.
- 3 Dejte jednotlivé součásti do horního stojanu myčky nádobí. Ujistěte se, že je výrobek bezpečně uložen lícem nahoru, jak je znázorněno na obrázku. Po dokončení vyjměte z myčky nádobí.
- 4 Otřepete přebytečnou vodu a nechte uschnout na vzduchu ve svislé poloze. Než zařízení opět složíte, přesvědčete se, že jsou jeho součásti suché.
- 5 Znovu sestavte, nasadte přední díl na konec komůrky a pevně otočte, dokud není bezpečně zajištěn. Vyrovnávací prvek Vycentrujte vyrovnávací značku na zadním dílu s indikátorem **Flow-Vu**, jako je znázorněno na obrázku. Pevným stisknutím připojte zadní díl.

- Poznámky:
- Výrobek je třeba vyměnit po 12 měsících používání.
 - Tento výrobek neobsahuje latex.
 - Toto zdravotnické zařízení nikomu nepůjčujte.
 - Pokud dojde k nahrazení léku uvnitř komory, lehce vnitřek vyčistěte měkkým hadříkem.
 - Mytí v myčce s příliš špinavým nádobím se nedoporučuje.
 - Při čištění v myčce použijte leštidlo.
 - Myčka nádobí je ověřena až do 70°C.
- ⚠ Upozornění:**
- **Nenechávejte komoru bez dozoru v rukou dětí. Není to hračka.**