


# AeroChamber Plus Flow-Vu

Chambre de Retenue Valvée Antistatique  
MASQUE MOYEN / MASQUE PETIT

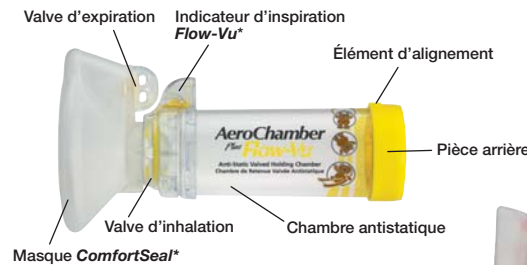

CHAMBRE À MASQUE MOYEN



CHAMBRE À MASQUE PETIT



## USAGE PRÉVU

Cette chambre est destinée à être utilisée avec un aérosol-doseur afin d'administrer un médicament en aérosol dans les poumons comme il a été prescrit par votre fournisseur de soins de santé. Si vous avez des questions sur le rendement ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter votre professionnel de la santé.

## COMMENT UTILISER VOTRE NOUVELLE CHAMBRE À VALVE

Cette chambre à valve est directement prête à l'emploi. Avant l'utilisation, veuillez à ce que ces consignes ainsi que celles fournies avec l'inhalateur soient lues et conservées à portée de main en tout temps.

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>
<p>Avant l'utilisation, examinez la chambre soigneusement. Remplacez-la immédiatement si une défectuosité est décelée.</p>	<p>Retirez le capuchon de l'inhalateur.</p>	<p>Secouez l'inhalateur immédiatement avant usage conformément aux consignes fournies avec l'appareil.</p>	<p>Insérez l'inhalateur dans la pièce arrière de la chambre.</p>	<p>Placez le masque sur le visage en vous assurant que le joint est étanche. L'indicateur <b>Flow-Vu</b> ne se déplace que si l'enfant réussit un contact étanche.</p>	<p>Activez l'aérosol-doseur au début d'une inspiration lente lorsque l'indicateur <b>Flow-Vu</b> se déplace en direction de l'enfant. Utilisez l'indicateur <b>Flow-Vu</b> pour compter le nombre de respirations. Maintenez le masque en place pendant 5 à 6 respirations après avoir appuyé sur l'inhalateur. Administrez une seule (1) bouffée à la fois.</p>	<p>Suivez les consignes de l'inhalateur sur le temps d'attente à respecter avant de répéter les étapes 3 à 6.</p>

## ASTUCES

- 1 Félicitez et encouragez votre enfant pour ses efforts.
- 2 Faites semblant d'utiliser la chambre sur un oursin en peluche ou sur une poupée, comme s'il s'agissait d'un jeu.
- 3 Si possible, choisissez un moment où votre enfant est serein et joyeux pour lui administrer le traitement.
- 4 Utilisez l'indicateur **Flow-Vu** pour assurer une bonne étanchéité et pour compter le nombre de respirations.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Cette chambre est directement prête à l'emploi et doit être nettoyée chaque semaine.

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>
<p>Retirez la partie arrière. Pour détacher la partie avant, tournez la chambre comme illustré ci-dessus.</p>	<p>Faites tremper les pièces dans une solution savonneuse douce de détergent à vaisselle liquide et d'eau tiède propre, pendant 15 minutes. Agitez doucement. Rincez les pièces avec une eau propre.</p>	<p>ou</p> <p>Placez les pièces dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous que les articles soient placés verticalement et solidement, comme indiqué sur l'image. Retirez-les du lave-vaisselle lorsque le nettoyage est terminé.</p>	<p>Éliminez le surplus d'eau des pièces en les secouant et laissez-les sécher à l'air en position verticale. Assurez-vous que les pièces sont sèches avant de les réassembler.</p>	<p>Pour réassembler, placez la partie avant sur l'extrémité de la chambre et tournez fermement jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée à sa position.</p>

**REPLACER 12 MOIS**

### Inscrivez-vous pour une nouvelle chambre

Pour une performance optimale, vous devriez remplacer votre chambre tous les 12 mois. La plupart des polices d'assurance couvrent le remplacement de la chambre au moins une fois par année. Inscrivez-vous à [www.aerochamber.com/trreminder](http://www.aerochamber.com/trreminder) pour recevoir un rappel annuel afin de renouveler votre prescription pour la chambre **AeroChamber Plus Flow-Vu**.



- Remarques :
- Le produit doit être remplacé au bout de 12 mois d'utilisation. Les conditions environnementales, le mode de stockage et la fréquence d'utilisation peuvent avoir des répercussions sur la durée de vie du produit.
  - Ce produit ne contient pas de latex.
  - Ne partagez pas l'utilisation de cet appareil médical avec d'autres personnes.
  - Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil dans un récipient approprié.
  - Si vous constataz un dépôt de médicament dans la chambre, nettoyez soigneusement l'intérieur de la chambre avec un chiffon doux.
  - Le nettoyage au lave-vaisselle n'est pas recommandé si la vaisselle est excessivement sale.
  - Si le nettoyage se fait au lave-vaisselle, utilisez un agent de rinçage.
  - Nettoyage au lave-vaisselle validé jusqu'à 70°C.

**Mises en garde :**  
 • Ne laissez pas la chambre à proximité d'enfants sans surveillance.  
 Ceci n'est pas un jouet.

Fabriqué par :

**Trudell Medical International\***

725 Third Street, London, Ontario, Canada N5V 5G4  
[customerservice@trudellmed.com](mailto:customerservice@trudellmed.com)  
 +1-866-510-0004  
[www.trudellmed.com](http://www.trudellmed.com)

