



AeroChamber
Plus **Flow-Vu**

Anti-Static Valved Holding Chamber
SMALL MASK / MEDIUM MASK



Trudell Medical International
725 Third Street, London, Ontario,
Canada N6Y 5G4
☎ customer.service@trudellmed.com
☎ +1-519-405-7060
☎ +1-519-405-6478
www.trudellmed.com



Trudell Medical International Europe Limited
BioCity Nottingham, Pennyfoot Street,
Nottingham, United Kingdom NG1 1GF

Ελληνικά

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτός ο θάλαμος προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με μια δοσιμετρική συσκευή εισπνοών για τη χορήγηση φαρμάκου σε μορφή αερολύματος (aerosol) στους πνεύμονές σας, όπως έχει συνταγογραφηθεί από το γιατρό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- 1 Επαινέστε και επιβραβεύστε τη χρήση.
- 2 Χρησιμοποιήστε "αρκουδάκια" ή κούκλες που υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν το θάλαμο για να το κάνετε να φαίνεται σαν παιχνίδι.
- 3 Εάν είναι δυνατόν, χορηγήστε τη θεραπεία όταν το παιδί είναι χαρούμενο και δεν κλαίει.

Εύκολα στη χρήση βίντεο για τους ασθενείς διατίθενται στη διεύθυνση www.aerochamber.com

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΑΛΑΜΟ

Αυτός ο θάλαμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτές τις οδηγίες και τις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή εισπνοών.

- 1 Πριν τη χρήση, εξετάστε προσεκτικά τη φιάλη. Αντικαταστήστε αμέσως εάν παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα.
- 2 Αφαιρέστε το πώμα από τη συσκευή εισπνοών.
- 3 Ανακινήστε τη συσκευή εισπνοών αμέσως πριν τη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή εισπνοών.
- 4 Εισαγάγετε τη συσκευή εισπνοών στο οπίσθιο τμήμα του θαλάμου.
- 5 Φορέστε τη μάσκα στο πρόσωπο και εξασφαλίστε αποτελεσματική σφράγιση. Ο δείκτης **Flow-Vu** κινείται μόνο εάν το παιδί έχει εξασφαλίσει καλή στεγάνωση.
- 6 Πιέστε τη συσκευή εισπνοών στην αρχή μιας αργής εισπνοής καθώς ο δείκτης **Flow-Vu** κινείται προς το παιδί. Χρησιμοποιήστε το δείκτη **Flow-Vu** για να μετρήσετε τις αναπνοές. Διατηρήστε τη στεγάνωση για 5 – 6 αναπνοές αφού πιέσετε τη συσκευή εισπνοών. Χορηγήστε έναν (1) ψεκασμό κάθε φορά.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή εισπνοών για το χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένετε πριν επαναλάβετε τα βήματα 3 – 6.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Αυτός ο θάλαμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία και πρέπει να καθαρίζεται κάθε εβδομάδα.

- 1 Αφαιρέστε το οπίσθιο εξάρτημα. Για απόσπασή του πρόσθιου εξαρτήματος, περιστρέψτε τη φιάλη όπως φαίνεται παραπάνω.
- 2 Εμβυθίστε και τα δύο εξαρτήματα για 15 λεπτά σε ήπιο διάλυμα υγρού απορρυπαντικού πιάτων και χλιαρού καθαρού νερού. Ανακινήστε ελαφρά. Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με καθαρό νερό.
- 3 Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στο πάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ασφαλώς τοποθετημένο με την πρόσοψη προς τα πάνω όπως φαίνεται στην εικόνα. Αφαιρέστε το από το πλυντήριο πιάτων όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος πλυσίματος.
- 4 Ανακινήστε για να αφαιρέσετε την υπερβόλυσσα ποσότητα νερού και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει σε κάθετη θέση. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν την επαναυναρμολόγησή τους.
- 5 Για επαναυναρμολόγηση, προσαρτήστε το πρόσθιο εξάρτημα στο άκρο της φιάλης και περιστρέψτε σταθερά έως ότου ασφαλίσει στην κλειδωμένη του θέση. Κεντράρετε το σημιάδι ευθυγράμμισης στο οπίσθιο εξάρτημα με το δείκτη του **Flow-Vu**, όπως φαίνεται στην εικόνα. Πιέστε σταθερά για να προσαρτήσετε το οπίσθιο εξάρτημα.

Σημειώσεις:

- Πρέπει να αντικαθιστάτε το προϊόν μετά από χρήση 12 μηνών.
- Αυτό το προϊόν δεν περιέχει λατέξ.
- Μην μοιράζετε αυτήν την ιατρική συσκευή με άλλους.
- Εάν παρατηρήσετε συσσώρευση φαρμάκου στο θάλαμο, ξεπλύνετε το εσωτερικό του θαλάμου απαλά με ένα μαλακό πανάκι.
- Δεν συνιστάται το πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων με πολύ λερωμένα πιάτα.
- Εάν χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων, χρησιμοποιήστε ένα βοηθητικό προϊόν για το ξέπλυμα.
- Το πλυντήριο πιάτων ποιοποιείται έως 70°C.

⚠️ Θέματα προσοχής:

- Μην αφήνετε το θάλαμο κοντά σε παιδιά χωρίς επίτηρηση. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.