



AeroChamber
Plus **Flow-Vu**
Anti-Static Valved Holding Chamber
SMALL MASK / MEDIUM MASK



Trudell Medical International
725 Third Street, London, Ontario,
Canada N6V 5G4
☎ customer.service@trudellmed.com
☎ +1-519-455-7069
☎ +1-519-455-6478
www.trudellmed.com



Trudell Medical International Europe Limited
BioCity Nottingham, Pennyfoot Street,
Nottingham, United Kingdom NG1 1GF

TÜRKÇE

KULLANIM AMACI

Bu bölmenin, sağlık uzmanınız tarafından belirtilen şekilde akciğerinize aerosol ilaç aktarmak üzere ölçümlü doz inhaleri ile birlikte kullanılması amaçlanır.

İPUÇLARI

- 1 Ödüllendirin ve teşvik edin.
- 2 Oyuncak ayılara veya bebeklere bölmeyi kullanırdır 'gibi yaparak' bunu oyuna dönüştürün.
- 3 Mümkünse çocuk ağlamadığında ve mutluken ödülleri verin.

Pratik Hasta Videolarına şu adresten ulaşabilirsiniz:
www.aerochamber.com

YENİ BÖLMENİZİN KULLANIMI

Bu bölme, ambalajından çıktığı şekliyle kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce, inhaler ile birlikte gelen bu talimatları mutlaka okuyun.

- 1 Kullanımdan önce hücreyi dikkatle inceleyin. Herhangi bir kusur tespit ederseniz derhal değiştirin.
- 2 Inhalerin kapağını çıkarın.
- 3 Ürünle gelen talimatlar doğrultusunda, inhaleri kullanmadan hemen önce çalkalayın.
- 4 Inhaleri bölmenin Arka Bölümüne takın.
- 5 **Flow-Vu** Göstergesi Maskeyi yüzünüze takın ve iyice oturduğundan emin olun. **Flow-Vu** Göstergesi, sadece çocuğun izolasyonu iyi ise hareket eder.
- 6 Yavaş solunumun başlangıcında **Flow-Vu** Göstergesi çocuğa doğru hareket ederken, solunum ünitesine bastırın. Nefesleri saymak için **Flow-Vu** Göstergesini kullanın. Solunum ünitesi bastırıldıktan sonra izolasyonu 5 – 6 soluk boyunca muhafaza edin. Bir kerede bir (1) nefes uygulayın.
- 7 3 – 6. adımları tekrarlamadan önce beklemeniz gereken süreyi öğrenmek için inhaler ile birlikte gelen talimatlara bakın.

TEMİZLİK TALİMATLARI

Bu bölme, ambalajından çıktığı şekliyle kullanıma hazırdır ve daha sonra haftada bir temizlenir.

- 1 Arka üniteyi çıkarın. Ön üniteyi çıkarmak için, hücreyi, yukarıda gösterildiği şekilde bükün.
- 2 Parçaları 15 dakika süre ile ılık temiz su ve yumuşak bir bulaşık deterjanı solüsyonunda bekletin. Hafifçe karıştırın. Parçaları temiz suda durulayın.
- 3 **VEYA** Parçaları bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirin. Ürünlerin, resimde gösterildiği üzere sağlam bir şekilde yerleştirilmiş olmasını temin edin. Tamamlandığı zaman bulaşık makinesinden çıkarın.
- 4 Sallayarak fazla suyu alın ve dikey konumda kurumaya bırakın. Yeniden monte etmeden önce parçaların kuruduğundan emin olun.
- 5 Tekrar monte etmek için, Ön üniteyi hücrenin ucuna yerleştirip yerine emniyetli bir şekilde kilitlemeye kadar sıkıca çevirin.
- 6 Arka ünite üzerinde Hizalama Çizgisini gösterildiği şekilde **Flow-Vu** Göstergesinin ortasına getirin. Arka üniteyi yerleştirmek üzere sıkıca bastırın.

Notlar:

- Ürün 12 aylık kullanımın sonunda değiştirilmelidir.
 - Bu ürün lateks içermez.
 - Bu tıbbi cihazı başkalarıyla ortak kullanmayın.
 - Bölmede ilaç birikimi olduğunu fark ederseniz, bölmenin içini yumuşak bir bez yardımıyla yavaşça yıkayın.
 - Bulaşık makinesinde aşırı kirli bulaşıklarla beraber yıkanması tavsiye edilmez.
 - Bir bulaşık makinesinde yıkıyorsanız, bir durulama destek malzemesi kullanın.
 - Bulaşık makinesinde 70°C'ye kadar kullanım uygundur.
- ⚠️ Önlemler:**
- Bölmeyi çocukların yanında gözetimsiz bırakmayın. Bu cihaz oyuncak değildir.