

2 en 1

Débutons.

FAIT PARTIE DE LA
GAMME DE CHAMBRES
AeroChamber^{MD}



2 en 1
Chambre +
Étui de protection

Aero2go^{MC}
Chambre

Chambre de retenue valvée antistatique

www.aerochamber2go.com

UTILISATION PRÉVUE


La chambre **AeroChamber2go^{MC}** est prévue pour une utilisation avec la plupart des inhalateurs-doseurs sous pression pour administrer des médicaments en aérosol dans les poumons.

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre prestataire de soins de santé.


FONCTIONNEMENT

Lorsque vous appuyez sur l'inhalateur, la chambre maintient le médicament en suspension. Cela vous donne plus de temps pour inhaler et vous aide à administrer le médicament aux poumons, là où il est nécessaire.


UTILISATION DE VOTRE CHAMBRE

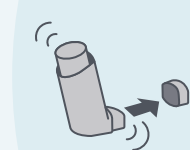

Agitez
l'inhalateur
immédiatement
avant l'utilisation
(enlever le capuchon)

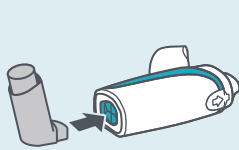

Insérez
l'inhalateur à
l'arrière de la
chambre

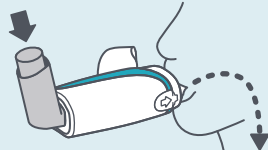

Appuyez
sur l'inhalateur tout
en commençant à
inspirer **lentement**
et profondément

Remarques

- Assurez-vous que ces instructions et que les instructions fournies avec l'inhalateur ont été lues et sont disponibles à tout moment.
- Prenez une bouffée à la fois.
- La chambre doit être remplacée après 12 mois d'utilisation.

Avertissement


- Examinez soigneusement la chambre en vous assurant qu'il n'y a pas de débris à l'intérieur.
- Remplacez immédiatement si la chambre est endommagée ou si des pièces sont manquantes.

Conseils

- Pour de meilleurs résultats, retenez votre souffle aussi longtemps que vous vous sentez à l'aise avant d'expirer. Cela permet d'améliorer l'efficacité du médicament.
- Si vous n'êtes pas capable de retenir votre souffle, vous pouvez simplement appuyer sur l'inhalateur et inspirer et expirer normalement 2 fois à travers la chambre pour inhaler votre médicament.

CHAMBRE 2 EN 1 + ÉTUI DE PROTECTION POUR VOTRE INHALATEUR

Votre inhalateur peut être conservé à l'intérieur de la chambre.

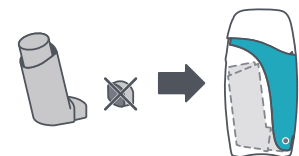


- Retirez le capuchon de l'inhalateur lorsque vous le rangez à l'intérieur de la chambre.
- La chambre est fermée aux deux extrémités, ce qui permet d'éviter que des débris n'y pénètrent.
- Conçu pour s'adapter aux inhalateurs les plus couramment prescrits. (Note : L'inhalateur est vendu séparément)

Attention

- Ne convient pas aux inhalateurs ronds comme Airomir[†], Qvar[†] ou Alvesco[†].

Pour ouvrir la chambre :

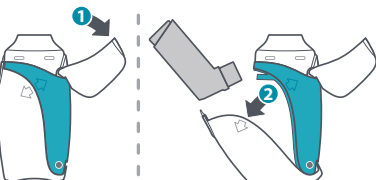


Ordre inverse pour fermer.

Avertissement

- Assurez-vous que vous êtes facilement capable d'ouvrir et de fermer la chambre avant de ranger votre inhalateur à l'intérieur.

NETTOYAGE DE VOTRE CHAMBRE

La chambre peut être utilisée dès qu'elle est sortie de l'emballage. Elle doit être nettoyée chaque semaine.

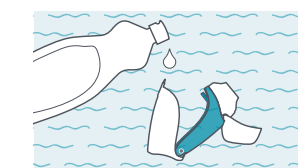

OU



1 Soulevez le capuchon et ouvrez la chambre pour retirer l'inhalateur.

2 Lavez la chambre dans de l'eau chaude et propre avec du détergent à vaisselle liquide en agitant doucement celle-ci. Rincer à l'eau propre.

OU Placez sur le panier supérieur du lave-vaisselle comme indiqué. Faites fonctionner le lave-vaisselle au cycle normal ou léger. Ne pas sécher à la chaleur.

3 Secouez l'excès d'eau et laissez sécher à l'air libre. Si vous avez besoin de la chambre immédiatement, séchez-la doucement avec un chiffon à vaisselle propre.

Remarques

- Si vous remarquez une accumulation de médicaments dans la chambre, nettoyez doucement l'intérieur de celle-ci avec un chiffon doux et propre.
- Ne pas faire bouillir ni stériliser.
- Il n'est pas recommandé de laver la chambre avec de la vaisselle très sale.
- Si vous nettoyez la chambre au lave-vaisselle, utilisez un produit de rinçage.
- Pour le nettoyage de l'inhalateur, suivez les instructions fournies avec l'inhalateur.

Attention

- Le produit peut être endommagé de façon permanente s'il est bouilli, stérilisé ou nettoyé dans un lave-vaisselle à une température supérieure à 70°C.

Scannez pour accéder à des vidéos de démonstration



La chambre doit être
remplacée tous les
12 mois d'utilisation.



Conçu et développé au
Canada avec l'aide de
personnes comme vous