


AeroChamber Plus Flow-Vu*

Anti-Static Valved Holding Chamber

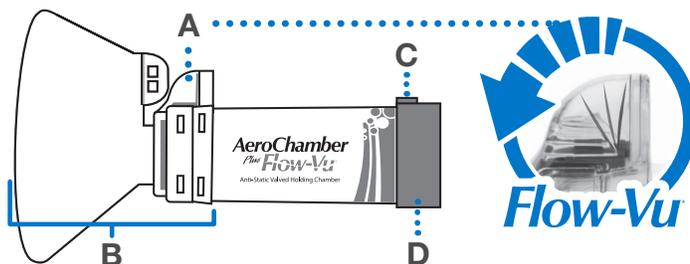

USO PREVISTO

La camera è prevista per l'uso assieme a un inalatore predosato per l'erogazione di farmaci in aerosol nei polmoni in base alla prescrizione del medico.

PRIMA DI OGNI UTILIZZO

La camera è pronta per l'uso. Verificare che le presenti istruzioni e quelle dell'inalatore siano state lette. Esaminare con cura la camera e rimuovere qualsiasi oggetto esterno. Sostituire immediatamente qualsiasi parte mancante o danneggiata.

Note



RALLENTARE l'inalazione se si avverte un suono simile ad un fischio, significa che si sta inalando troppo velocemente.




Se qualcuno vi sta aiutando, si può utilizzare l'Indicatore di inalazione **Flow-Vu*** per garantire una buona tenuta, coordinarsi premendo l'inalatore durante l'inalazione e contare il numero di respiri emanati. L'indicatore **Flow-Vu*** si sposta verso di voi durante l'inspirazione e si sposta solo se avverte una buona tenuta.

1x Somministrare una (1) erogazione alla volta. Prima di ripetere, lasciar trascorrere il tempo di attesa indicato nelle istruzioni fornite con l'inalatore predosato.

UTILIZZO DELLA CAMERA

Per la preparazione dell'inalatore, seguire le istruzioni fornite con lo stesso.

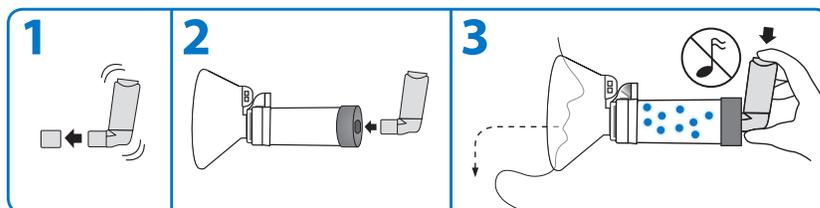

1 Rimuovere il cappuccio dall'inalatore. Immediatamente prima dell'uso agitare l'inalatore come da istruzioni accluse.

2 Inserire l'inalatore nella parte posteriore della camera. Applicare la maschera sul viso ed accertarsi che vi sia una tenuta efficace.

3 Espirare e quindi premere per una volta l'inalatore all'inizio di una lenta inalazione. Tenere salda la maschera e inspirare ed espirare attraverso la camera per 5-6 respirazioni.




Puoi guardare video paziente
facili da usare su **YouTube.com**



ISTRUZIONI DI PULIZIA

Questa camera è pronta per l'uso e in seguito può essere pulita una volta alla settimana.

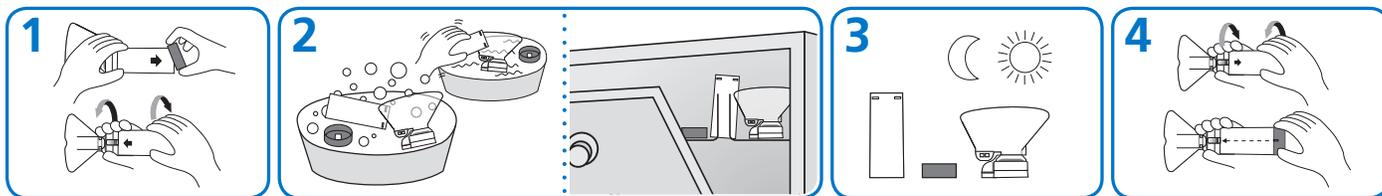

1 Rimuovere il componente posteriore (D). Per staccare il componente anteriore (B), ruotare la camera come illustrato sopra.

2 Lasciare a bagno i componenti in una soluzione delicata a base di detersivo liquido per piatti e acqua tiepida pulita per 15 minuti. Agitare delicatamente. Sciacquare i componenti in acqua pulita. **OPPURE** Collocare i componenti nel carrello superiore della lavastoviglie. Verificare che il prodotto sia posizionato saldamente rivolto verso l'alto. Eseguire un ciclo normale o leggero nella lavastoviglie. Non riscaldare a secco.

3 Agitare per rimuovere l'acqua in eccesso e lasciar asciugare all'aria in posizione verticale. Verificare che le parti siano asciutte prima di rimontarle.

4 Per rimontarle, inserire il componente anteriore (B) sull'estremità della camera e ruotarlo con decisione fino a bloccarlo saldamente in posizione. Centrare il perno di allineamento (C) sul componente posteriore con l'Indicatore di inalazione **Flow-Vu*** (A), come mostrato. Premere con decisione per fissare il componente posteriore (D).

Note

- Non bollire o sterilizzare.
- Il prodotto deve essere sostituito dopo 12 mesi d'uso.
- Questo prodotto non contiene lattice.
- Non condividere l'uso del presente dispositivo medico con altri utenti.
- Se si nota un accumulo di farmaco nella camera, pulire delicatamente l'interno della camera con un panno morbido.
- Il lavaggio in lavastoviglie con piatti eccessivamente sporchi non è consigliato.
- In caso di lavaggio in lavastoviglie usare un brillantante.

Attenzione

- Non lasciare la camera incustodita in presenza di bambini. Il dispositivo non è un giocattolo.
- Se viene sottoposto a bollitura, sterilizzazione o lavaggio in lavastoviglie a una temperatura superiore a 70°C, il prodotto può subire danni permanenti.